

# Infoblatt zum Umgang Mit COVID-19-Antigen-Selbsttests

**WICHTIG:** Der Schnelltest ist nur eine Momentaufnahme. Auch mit dem Test müssen alle bekannten Hygienemaßnahmen eingehalten werden!

## Durchführung

Führen Sie den Test nach der Anleitung in der Packung durch. Je nach Test erhalten Sie nach 15-20 min das Ergebnis.

## Ergebnis

- Erscheint nur eine Bande im Kontrollfeld, ist das Ergebnis negativ.
- Erscheint nur eine Bande bei T oder ist gar keine Bande zu sehen, ist das Ergebnis ungültig und der Test muss wiederholt werden.
- Erscheinen zwei Banden (Bei C und bei T), ist der Test positiv.

## Was tun?

### **Positives Ergebnis**

Spricht dafür, dass sie das Corona-Virus im Rachen tragen

1. Begeben Sie sich unverzüglich zu Hause in Quarantäne
2. Melden Sie sich **telefonisch** beim Hausarzt oder einem Testzentrum, da ein positiver Schnelltest immer durch einen PCR-Test bestätigt werden muss
3. Informieren Sie im Betrieb den Corona-Koordinator bzw. Ihren Vorgesetzten
  - ➔ Bei einem Test im Unternehmen muss eventuell auch das Gesundheitsamt informiert werden

### **Negatives Ergebnis**

Spricht dafür, dass **aktuell wahrscheinlich** keine Ansteckungsgefahr von Ihnen ausgeht

**ACHTUNG:** Das Ergebnis gibt Ihnen keine 100% Sicherheit!!

Der Test ist nur eine Momentaufnahme. Es kann sein, dass Sie das Virus schon in sich tragen und innerhalb der nächsten Stunden oder Tage trotzdem ansteckend sind!!

Achten Sie deshalb unbedingt auch mit einem negativen Ergebnis auf die bekannten Hygienemaßnahmen